




Thermochromatischer Baby Body von HOBEA-Germany

Temperaturempfindlicher **Aufdruck warnt vor Fieber**

PRODUKTDDETAILS:

- Thermochrom langarm Baby Body
- atmungsaktiv
- Made in EU, Spanien
- Material: 100 % Bio Baumwolle
- Waschbar bei 40°

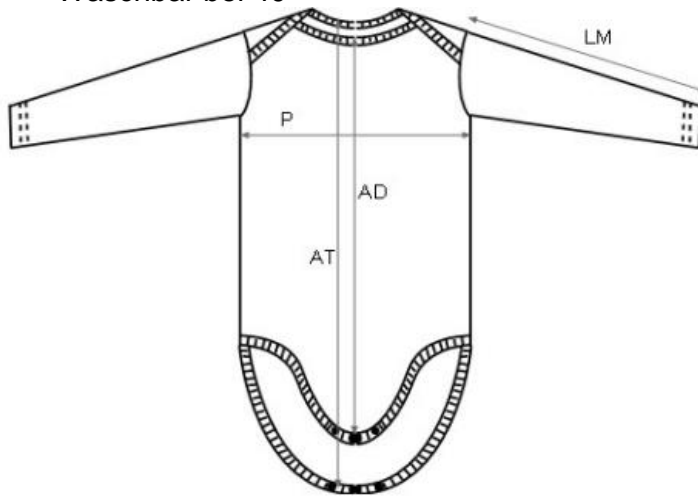

Monate / Month	Größe in cm / Size in cm	Konfektionsgröße Deutschland / clothes size Germany	P Brustweite / Chest width	AT Rückenlänge / back length	AD Länge Vorderseite / front length	LM Armlänge / arm length
1 Monat	52 cm	56	19,4 cm	37,9 cm	31 cm	15,7 cm
3 Monate	57-63 cm	62	20,4 cm	40,4 cm	33,3 cm	16,7 cm
6 Monate	63-68 cm	68	21,4 cm	42,8 cm	35,5 cm	18,2 cm
9 Monate	68-74 cm	74	22,4 cm	45,3 cm	37,8 cm	18,7 cm
12 Monate	74-78 cm	80	23,9 cm	48,6 cm	40,8 cm	19,4 cm
18 Monate	81-86 cm	86	25,4 cm	51,9 cm	43,8 cm	20,1 cm



ANWENDUNGS- UND SICHERHEITSHINWEISE:

1. Der Stoff wird so über den Brustkorb des Babys gezogen, dass sich keine Falten bilden, da diese das Ergebnis sonst verfälschen könnten.
2. Die wärmeempfindliche Applikation darf nicht durch Kleidungsstücke verdeckt werden, da dies zu einer Verfälschung der Ergebnisse führen würde.
3. Halten Sie die Baby Body Applikation fern von Wärmequellen, da diese ein negatives Ergebnis liefern würden.
4. Setzen Sie den Baby Body nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
5. Verwenden Sie den Baby Body möglichst nicht draußen als Oberbekleidung, da er für das Tragen innerhalb des Hauses gedacht ist.
6. Waschen Sie den Baby Body auf links, um einen Abrieb des Drucks zu vermeiden.

7. Wenn Sie Ihrem Baby den Body angezogen haben, ist das Ergebnis nach ca. 3 Minuten sichtbar. Die thermochromische Temperaturskala für das Kind lässt sich wie folgt ablesen:



7.1 Die Farbe der thermosensitiven Applikation (lila) verändert sich nicht im Vergleich zum Referenzsymbol (rot). Es ist davon auszugehen, dass die Temperatur des Kindes unter 37,5°C liegt und sich kein Fieber entwickelt.

7.2 Die Farbe der thermosensitiven Applikation (lila) verfärbt sich rot und entspricht der des Referenzsymbols (rot). Die Temperatur des Kindes liegt bei 37,5°C und könnte sich zu einem Fieber entwickeln.

7.3 Die Farbe der thermosensitiven Applikation (lila) verfärbt sich und ist heller als die des Referenzsymbols (rot). Dies ist ein Hinweis darauf, dass das Baby eine Körpertemperatur von mehr als 38°C und damit Fieber haben könnte.

Farbänderung bei erhöhter Temperatur von von lila bis rot

Bitte beachten Sie: Der Body ist ein Artikel, der der Information dient und ist nur eine Orientierungshilfe bei einem Anstieg der Temperatur des Babys auf über 38,5° und soll die Eltern/Aufpasser des Babys warnen, damit diese die genaue Temperatur mit einem Thermometer nachträglich messen können. **ACHTUNG:** Der Body ersetzt auf keinen Fall die Messung mit einem Thermometer.

HOBEA-Germany GmbH
Friedrich-Ebert-Straße 50
DE - 35440 Linden



Fon +49(0) 6403 775503-0
Fax +49(0) 6403 775503-19
E-Mail info@hobea.de
Web www.hobea-germany.de
Shop www.hobea.de